

LE PROGRAMME COMPLET POUR LES SURFACES EN JUSTE



Incidin™ Pro

Désinfectant de surfaces pour produits médicaux et surfaces de tout type

Avec sa nouvelle formule SMART-BALANCED, Incidin™ Pro établit des nouveaux standards dans le domaine du nettoyage et de la désinfection professionnelle des surfaces.

- ▲ Votre Pro pour la rapidité
- ▲ Votre Pro pour l'efficacité
- ▲ Votre Pro pour la tolérance



Incidin™ Pro

Désinfectant de surfaces pour produits médicaux et surfaces de tout type

Notre prestation	Votre bénéfice
Vaste spectre d'action - testé selon les derniers standards NF EN	Désinfection et nettoyage efficaces
Temps d'action restreint avec des concentrations d'utilisation réduites	Économies de temps et de coûts
Excellente efficacité de nettoyage	Surfaces propres avec une importante compatibilité du matériau
Excellente tolérance	Compatible avec les métaux, le linoléum, le PVC, la céramique, le caoutchouc et le plastique



Le programme complet en juste 60 minutes

- ▲ Efficacité* testée par la norme EN 16615 : 0,5 % après 30 minutes
- ▲ Efficacité* contre le norovirus : 1% après 60 minutes
- ▲ Efficacité tuberculicide* : 1,5 % après 60 minutes
- ▲ Efficacité mycobactéricide, 1,5 % après 60 minutes

* Charge testée selon les dernières normes NF EN et sous une charge élevée

EFFICACITE	CONCENTRATION %	ml/L	TEMPS D'ACTION min.
Liste VAH (bactéricide, levuricide)			
Désinfection de surfaces selon la directive DGHM 2001 par des moyens mécaniques sous une charge réduite et élevée	0,5/1	5/10	30/15
Contrôle selon la directive DVV/RKI			
Action virucide limitée (y compris les VIH, HBV, HCV) selon la recommandation 1/2004* du RKI	0,25/0,5	2,5/5	30/15
Norovirus (MNV)*	1,5	15	30
Rotavirus*	1/1,5	10/15	60/5
Adénovirus*	2	20	60
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	1,5	15	15
Normes EURO (charge faible et élevée)			
NF EN 13727 (bactéricide)	0,25	2,5	5
NF EN 13624 (levuricide)	0,25	2,5	5
NF EN 14348 (mycobactéricide)	1,5	15	60
NF EN 14476 (norovirus, MNV)	1/1,5	10/15	60/30
Normes EURO essai à 4 zones (charge élevée)			
NF EN 16615 (bactéricide)	0,5	5	30
NF EN 16615 (levuricide)	0,5	5	30
Désinfection de surfaces selon la directive DGHM 2001 (charge faible et élevée)			
Mycobactéricide, moyens mécaniques	2/4	20/40	120/60

* DVV 2015 (test de suspension)

Distributeurs :

ECOLAB (SUISSE) GMBH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41(0) 61-466-94-66
www.ecolabhealthcare.ch



ECOLAB ALLEMAGNE GMBH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49(0) 2173-599-1900



RAPIDE.
EFFICACE.
COMPATIBLE.



Désinfection de surfaces pour produits médicaux



Concentré désinfectant liquide pour la désinfection de surfaces de tout type.
CHZN 3555

MODE D'EMPLOI

Préparez la solution active dans la concentration d'utilisation souhaitée en diluant le concentré dans de l'eau de qualité au moins potable (max. 30°C).

Nettoyez la surface à traiter à l'aide d'un chiffon humide. Veillez au mouillage homogène. Les règlements de prévention des accidents prescrivent le port de gants de protection.

Les désinfectants contenant des amines ou bien des dérivées d'amines et les désinfectants contenant des aldéhydes ne doivent pas être employés en alternance.

Au préalable de tout changement, il faut un nettoyage intermédiaire approfondi.

COMPOSITION

Substance active dans 100g :
10,0 g 2-Phénoxyéthanol,
8,0 g N,N-bis-(3-aminopropyl) dodecylamine,
7,5 g chlorure de benzalkonium

EXPERTISE

Tests microbiologiques, virologiques, toxicologiques et écologiques exhaustifs.

Sur demande, le dossier d'expertise pourra être mis à votre disposition.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Produit	Unité de conditionnement	N° d'article
Incidin™ Pro Sachet doseur	400 x 20 ml	30 765 60
Incidin™ Pro Flacon doseur	3 x 2 L	30 766 80
Incidin™ Pro Bidon	6 L	30 767 60

STOCKAGE

Le produit dans l'emballage original ne doit pas être stocké à une température supérieure à 25°C.

À stocker dans un local frais, sec et à l'abri du soleil.

VEILLEZ A LA PRUDENCE LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS BIOCIDES ET MEDICAUX. L'ETUDE DE L'ETIQUETTE ET DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT EST OBLIGATOIRE AVANT TOUTE UTILISATION PRODUIT RESERVE A L'USAGE PROFESSIONNEL