

DER VOLLTREFFER FÜR PROFI-FLÄCHENDESINFEKTION

Incidin® Pro

Das neue, aldehydfreie Desinfektionsmittel
für Medizinprodukte und Oberflächen

Incidin® Pro setzt mit seiner
SMART-BALANCED-Formel einen neuen
Standard für die Profi-Reinigung
und Desinfektion von Oberflächen.

- Ihr Pro für Schnelligkeit
- Ihr Pro für Effektivität
- Ihr Pro für Verträglichkeit



NEU!



Incidin® Pro

Das neue, aldehydfreie Desinfektionsmittel für Medizinprodukte und Oberflächen

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Breites Wirkspektrum - nach den neuesten EN Standards getestet	Effektive Desinfektion und Reinigung
Kurze Einwirkzeiten bei niedrigen Anwendungskonzentrationen	Zeit- und Kostenersparnis
Exzellente Reinigungsleistung	Saubere Oberflächen mit hoher Materialkompatibilität
Exzellente Verträglichkeit	Verträglich mit Metallen, Linoleum, PVC, Keramik, Gummi und Kunststoff

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION		EINWIRKZEIT
	%	ml/L	Min.
VAH-Liste (bakterizid, levurozid)			
Flächendesinfektion gemäss VAH, mit Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	0,5/1,0	5/10	30/15
Gem. RKI-Empfehlung 1/2004			
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	0,25/0,5	2,5/5	30/15
EURO-Normen			
EN 13727 (bakterizid, mit / ohne Belastung)	0,25	2,5	5
EN 13624 (levurozid, mit / ohne Belastung)	0,25	2,5	5
EN 14348 (mykobakterizid)	1,5	15	60
EN 14476 (Norovirus)*	1,0/1,5	10/15	60/30
Prüfung nach DGHM 2001			
Mykobakterizid	2,0/4,0	20/40	120/60
Prüfung gemäss DVV 2008			
Norovirus (MNV)	1,5	15	30
Rotavirus	1,0/1,5	10/15	60/5
Adenovirus	2,0	20	60
Polyomavirus SV40	1,5	15	15

* dirty conditions

SCHNELL.
EFFEKTIV.
VERTRÄGLICH.

ANWENDUNGSBEREICHE

Zur professionellen Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und Oberflächen.

HINWEISE

Biozide sicher verwenden. Lesen Sie vor der Anwendung stets das Etikett und die Produktinformationen. Entsorgen Sie die Verpackung nur in entleertem und verschlossenem Zustand. Produktrückstände: siehe Sicherheitsdatenblatt.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g ist als Wirkstoff enthalten: 10,0 g 2-Phenoxyethanol, 8,0 g N,N-bis-(3-Aminopropyl)dodecylamin, 7,5 g Benzalkoniumchlorid

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin® Pro Beutel	400 x 20 ml	3076560
Incidin® Pro Nachfüllflasche	3 x 2 L	3076680
Incidin® Pro Kanister	6 L	3076760

BIOZIDE SICHER VERWENDEN.
VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG
UND PRODUKTINFORMATION LESEN.

WORLDWIDE HEADQUARTERS

370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Phone +49 (0) 2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de

REGIONAL OFFICE

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kriegackerstrasse 91
4132 Muttenz
Phone +41 61 466 94 66
www.ch.ecolab.eu

